

motion

**РЪКОВОДСТВО
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ**



185, Jiraeul-ro, Jijeong-myeon, Wonju-
si, Gangwon-do, Korea

TEL: +82-33-730-0001 / FAX: +82-33-730-0007

<https://www.nuga.kr>
<https://nugabest.bg/>



ENGLISH_EEU / Rev. 00
2406

[BULGARIAN]

Съдържание

Представяне на продукта

- 8 Характеристики на продукта
- 9 Ръководство за продукта
- 10 Имена и функции на продукта
- 12 Продуктови компоненти

Монтаж и използване

- 14 Преди инсталирането на продукта
- 16 Как да инсталирате продукта
- 18 Тестови операции след инсталиране

Как да използвате продукта

- 20 Бутони на пулт
- 21 Съдържание на екрана
- 22 Как да използвате пулта
- 22 Режими (автоматичен, интензивен, ръчен)
- 25 Интелигентен модул за настройка на температура/интензитет
- 26 Предварително загряване/Скорост
- 27 Настройка на звука на пулт
- 28 N-sonic (опция)
- 29 Мулти елементи (опция)
- 30 Модул за въздушен масаж (опция)
- 31 Използване на продукта
- 32 Как да предприемете спешни действия по време на употреба

Съхранение и грижа за продукта

- 34 Как да съхранявате и почиствате продукта след употреба
- 35 Индикаторен прозорец на контролера
- 37 Елементи за самопроверка
- 38 Преди всяка сервис заявка
- 39 Спецификации на продукта
- 40 Гаранция на продукта

Предупреждения за безопасност

Благодарим ви, че закупихте този продукт.

Преди употреба, **поля, прочетете предупрежденията за безопасност в ръководството за потребителя, за да използвате безопасно този продукт.**

Предупреждения за вашата безопасност

- Прочетете следните подробности, за да използвате продукта по подходящ начин.
- Това Ръководство класифицира нивото на риска в следните две степени и следните графични символи напомнят на потребителите за предупреждения за въпроси и операции или опасения относно всеки риск.
- В това ръководство следните пиктограми се използват, за да напомнят на потребителите да внимават за предмети и операции, които могат да бъдат опасни.

Тълкувания на символи



Внимание



Предупреждение



Ръководство за употреба
/ Вижте брошурата



Устройство от клас II

Отказ от отговорност

- Производителят, вносителят и/или агентът не носи отговорност за какъвто и да е проблем и/или друга повреда на продукта, която е причинена от грешка или операция на потребителя.
- Информацията в ръководството за потребителя е изготвена въз основа на текущите спецификации на продукта.
- Детайлите в ръководството за потребителя може да се различават от тези върху продукта.
- Производителят на продукта ще добавя и допълва нови функции по всяко време и нови технологии ще се прилагат към продукта непрекъснато и в бъдеще.
- Всички стандарти и функции подлежат на промяна без предупреждение към потребителите с цел подобряване на производителността.

Внимание

- 1) Не използвайте за цели, различни от предназначението.
- 2) Използвайте според ръководството за потребителя и спазвайте определения период и начин на употреба.
- 3) Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте произволно устройството. Ако е необходим ремонт, моля, свържете се със сервизен център.
(Това се дължи на риска от токов удар, пожар, лично нараняване, изгаряния и повреда на продукта.)
- 4) Не поставяйте запалими вещества, като свещи, цигари или алкохол, или купи с вода, тежки или остри предмети и др., върху продукта.
(Това се дължи на риска от токов удар, пожар и повреда.)
- 5) Не дърпайте кабела, за да изключите устройството, и не докосвайте щепсела с мокри ръце. (Това се дължи на риска от токов удар и пожар.)
- 6) В случай на гръм, светкавица или земетресение, незабавно спрете да използвате продукта и изключете захранването.
(Това се дължи на риска от токов удар и пожар.)
- 7) Не използвайте в затворено пространство, където има гориво или химикали.
(Това се дължи на риска от нараняване и пожар.)
- 8) Не използвайте на място, което е прашно или изложено на вода или големи температурни промени. (Това се дължи на риска от токов удар и пожар.)
- 9) Не включвайте няколко продукта в един контакт едновременно.
(Това се дължи на риска от токов удар, лично нараняване и повреда на продукта.)
- 10) Не скачайте и не удряйте продукта.
(Това се дължи на риска от нараняване и повреда на продукта.)
- 11) Не забравяйте да проверите дали захранващият кабел е повреден или износен преди употреба.
Внимавайте да избегнете задушаване от кабела.
(Това се дължи на риска от токов удар, лично нараняване и повреда на продукта.)
- 12) Не огъвайте прекалено много захранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него.
Не използвайте продукта на място, където е трудно да изключите захранващия кабел.

- 13) Използвайте продукта само след консултация с лекар, ако:
 - имате сърдечен проблем (особено ако имате пейсмейкър);
 - имат сензорни увреждания;
 - сте бременни;
 - имате кожни проблеми на мястото на употреба;
 - имате остро заболяване;
 - имате злокачествен тумор;
 - имате висока температура;
 - получават лечение за фрактура след поставяне на диагнозата;
 - са диагностицирани със загуба на усещане за температура поради тежко нарушение на периферното кръвообращение, причинено от тежък диабет и др.
- 14) Трябва да присъства настойник, за да може лице с увреждане или дете да използва този продукт.
- 15) Имайте предвид риска от нискотемпературни изгаряния в случай на продължителна употреба от деца, тези, които не могат сами да контролират температурата, и тези с намалена кожна чувствителност.
* Внимание: Трябва да носите дрехи по време на употреба.
- 16) Когато почиствате устройството, избършете само повърхността на устройството и не използвайте никакви дезинфектиращи спрейове.
- 17) Ако от продукта се излъчва миризма на изгоряло или дим, незабавно спрете да го използвате и се свържете със сервизен център.
- 18) Не използвайте външния нагревателен елемент (подложка за подгряване на корема), докато спите, тъй като има риск от изгаряне.
Когато използвате външен нагревателен елемент, поставете предпазния калъф.
- 19) Когато използвате нагревателя, внимавайте за изгаряния в случай на директен контакт с кожата.
Има риск от изгаряне при високи температури, затова го използвайте в подходящ температурен диапазон.
- 20) Внимавайте да не прилагате прекомерна сила върху кабела или да не го усуквате или прегъвате.
(Това се дължи на риска от повреда на продукта.)
- 21) Препоръчва се продуктът да се използва в подходящ температурен диапазон (40-50 °C).
(Това се дължи на риска от изгаряния.)

Предпазни мерки при използване на режим въздушен масаж


- 1) Не дърпайте и не хвърляйте силно продукта.
- 2) Внимавайте да не усучете въздушния маркуч на въздушния масажен модул.
- 3) Ако почувствате, че натискът е твърде силен, докато използвате режима на въздушен масаж, незабавно го спрете.
- 4) Пробиването на модула за въздушен масаж може да причини неизправност, така че внимавайте.
- 5) Възможно е да има шум по време на работа в режим въздушен масаж.
- 6) Ако почувствате, че въздушното налягане се различава значително от обичайното, когато работите в режим на въздушен масаж, свържете се със сервизен център.
- 7) Не използвайте върху участък от тялото, където е извършена кожна хирургия (кожна трансплантация).
- 8) Не използвайте веднага след операция за разширени вени и др.
- 9) Прекратете употребата, ако болката и т.н. станат силни, когато използвате този продукт.
- 10) Не използвайте, ако има кръвене в целевата област или ако се появи болка или възпаление с неизвестна причина.
- 11) Не потапяйте и не мийте въздушния масажен модул във вода.

- 12) Внимателно избършете въздушния масажен модул с влажна кърпа или кърпа



Предупреждение

- 1) Уверете се, че продуктът е нивелиран, когато е инсталиран.
- 2) Моля, имайте предвид, че използването на това устройство в комбинация с други устройства е опасно.
- 3) Спрете да използвате това устройство незабавно в случай на неизправност.
- 4) В случай на прекъсване на електрозахранването, незабавно изключете захранващия ключ.
- 5) Ако изпитате някакви аномалии в тялото си, когато използвате това устройство, спрете да го използвате. незабавно и се консултирайте с лекар.
- 6) Това не е водоустойчиво устройство. Не го потапяйте във вода и не го съхранявайте в баня, където нивото на влажност е високо.
- 7) В случай на продължителна употреба, не забравяйте да изключите захранващия кабел.
- 8) Не забравяйте да изключите захранващия кабел и всички свързани кабели, преди да преместите устройството.
- 9) Бъдете внимателни, когато се качвате или слизате от устройството, тъй като има риск от падане.

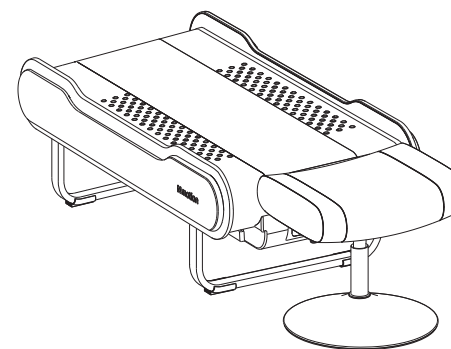

Представяне на продукта

- 8 Характеристики на продукта
- 9 Ръководство на продукта
- 10 Наименования и функции на продукта
- 12 Продуктови компоненти

Характеристики на продукта

Стилен дизайн

Ергономично проектиран, за да се чувствате удобно.
Изработен е от висококачествени материали, които са естетически издържани и са приятни на допир.
Устройството изглежда стилно и осигурява усещане за лекота заради цвета си.

Ергономично проектиран интелигентен модул

Модулът, състоящ се от четири вътрешни нагревателни елемента, предава топлина към шийните, гръдните и лумбалните прешлени и елементите се движат в зигзагообразен начин и подравняващо движение (движение за масиране), които са характерните движения на устройствата Nuga Medical.
Възможно е да се предоставят масажи, подходящи за типа тяло на потребителя, както е определено от сканиранятия, и потребителите могат да изпитат различни видове масажи, като използват устройството в различни режими.

Удобен Мулти-елемент

С мулти-елементи могат да се избират различни аксесоари според предназначението на потребителя.

Удобна стойка за пулт

Потребителят може да използва стойката на контролера под желания ъгъл.

Допълнителен нагревателен модул и NDT/NDC керамика


NDT керамика се използва в спомагателния нагревател (с изключение на някои модели).).

Ръководство за продукта




1. Как да се обърнете към предупрежденията за безопасност

Обърнете се към предупрежденията, които трябва да спазвате по време на употребата на продукта. (Вижте страница 3 в това ръководство за потребителя за повече подробности.)

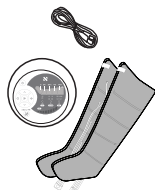

2. Как да проверите компонентите на продукта (ОПЦИЯ)

(Вижте страница 12 в това ръководство за потребителя за повече подробности.)

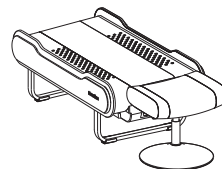


3. Как да инсталирате продукта

(Вижте страница 16 в това ръководство за потребителя за повече подробности.)



4. Как да използвате пулта


(Вижте страница 26 в това ръководство за потребителя за повече подробности.)

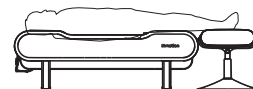

5. Как да използвате продукта

(Вижте страница 34 в това ръководство за потребителя за повече подробности.)

Имена и функции на продукта

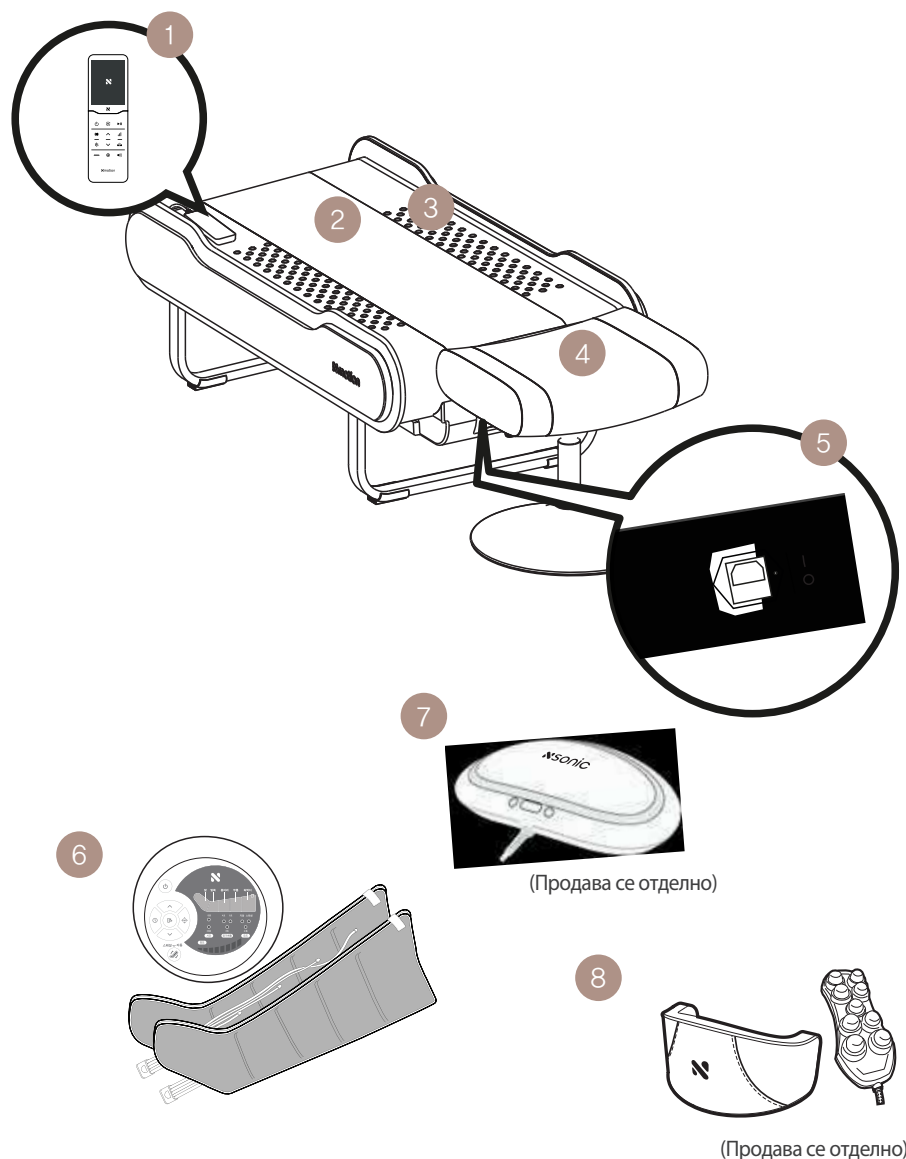

Име	Функция
1. Пулт	Потребителят може да избира настройките и режима на работа. Приложен е лесен за използване потребителски интерфейс.
2. Смарт модул	Включва NDC за загряване на областта на гръбначния стълб на потребителя, а интелигентният модул се движи в зигзагообразен начин, за да загрява и масажирва шията, гърба, раменете, талията и тазовите области.
3. Допълнителни загряващи елементи	NDT се използва за нагревателните модули, разположени на двете ръце, за да увеличат ефекта на нагриване и тези нагревателни модули прилагат определено количество топлина към тялото на потребителя.
4. Столче	Поддръжка за позициониране на краката при използване на продукта.
5. Захранване, N-sonic и конектор за доп. модули	Това е свързващият модул, където са свързани мощността, N sonic и мулти-блокът (външен нагревателен елемент и въздушен масажен модул).
6. Модул за въздушен масаж	Периодично надуйте въздушния маншон, за да компресирате крака.
7. N sonic (опция)	Масаж със звукови вибрации.
8. Външен нагревателен елемент (опция)	Външният нагревателен елемент е удобен за използване с отлична преносимост.


Продуктови компоненти

Въведение

Моля, проверете дали има всички компоненти, преди да инсталирате продукта. Моля, попитайте вашия доставчик, ако има липсващ или повреден компонент. Някои спецификации и/или дизайни подлежат на промяна за подобряване на производителността на продукта. Приложната част на продукта е частта, която генерира енергия. Те включват smart модул, външния проектор и нагревателната част на подложката за подгряване на корема, генератора на звукови вълни на N sonic и цялата вътрешност на въздушния масажор.

Основата (Приложна част)	Модул за въздушен масаж (Приложна част)	Захранващ кабел	Външно покритие
Ръководство за употреба	Тава за смартфони	Пулт	
N sonic (Продава се отделно) (Приложна част)	N sonic калъф (Приложна част)	Нагряваща подложка за корема (Продава се отделно) (Приложна част)	
9-сферен проектор (Продава се отделно) (Приложна част)	Калъф за външния проектор (Продава се отделно)	Лумбална опорна възглавница (Продава се отделно)	

- 1) Нагревателна част на интелигентния модул: 30~60 °C
- 2) Допълнителна нагревателна част: 30 ~ 60 °C
- 3) Нагревателна част на външен проектор: 40~60 °C
- 4) Нагревателна част на коремната нагревателна подложка: 40~60 °C

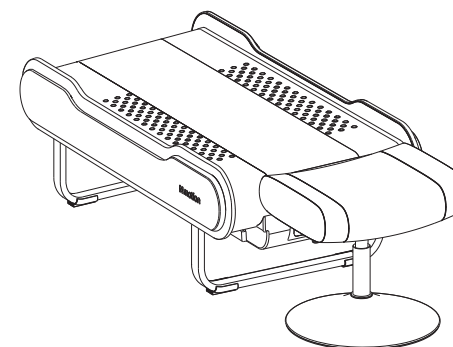


Инсталиране и употреба

- 14 Преди инсталирането на продукта
- 16 Как да инсталирате
- 18 Операции за тестване на продукта след инсталиране


Преди инсталирането на продукта

i Преди да използвате продукта,


1. Прочетете предоставеното ръководство за потребителя.
2. Проверете захранващото напрежение.
3. Проверете дали продуктът, аксесоарите и компонентите (по избор) са налични и дали са свързани правилно към захранващия конектор.
4. Свържете кабела на контролера към основното устройство.
5. След като свържете захранващия кабел към основното устройство, свържете го към електрическия контакт на стената.
6. Включете захранването и проверете дали екранът се включва.

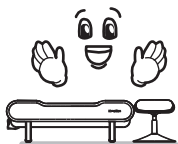


Преди да инсталирате този продукт, проверете дали има достатъчно място за него.
Инсталирайте продукта на равен под.
(В противен случай това може да повреди продукта.)

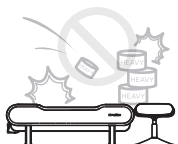


Не изпускайте уреда, пазете от удари на продукта.
(В противен случай това може да повреди продукта.)

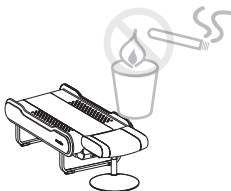


Не поставяйте никакви запалими вещества върху продукта, като например свещ или цигара.
(В противен случай има вероятност да причини токов удар или пожар.)

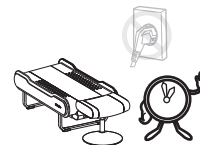


Изключете превключвателя на захранването, ако не го използвате дълго време. (В противен случай има вероятност да причините пожар.)

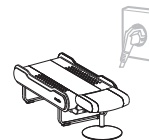


Преместете продукта, след като разделите захранването от свързващите линии, ако продуктът бъде преместен.
(В противен случай това може да причини токов удар, нараняване и/или повреда на продукта.)

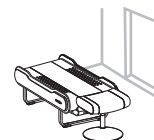

Не инсталирайте продукта на място което е съсредоточено движение. (В противен случай продуктът може да се повреди.)

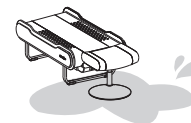


Не инсталирайте продукта на място с много влага или вода.
(В противен случай продуктът може да се повреди.)

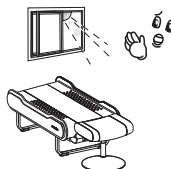

Внимавайте да не излагате продукта на пряка слънчева светлина. (В противен случай продуктът може да се повреди.)

Как да инсталирате продукта


1 Транспортиране на устройството

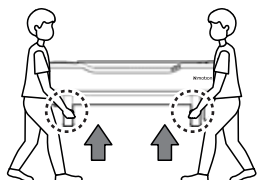

Не забравяйте да използвате краката, прикрепени към продукта, за да го преместите до мястото, където ще бъде използван.


Внимание
Бъдете внимателни, когато местите столчето.

2 Инсталиране на продукта

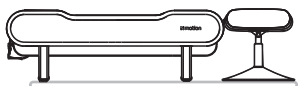


Поставете предоставеното килимче върху равна повърхност и монтирайте продукта.

3 Регулиране на стойката след свързване на конектора на пулта

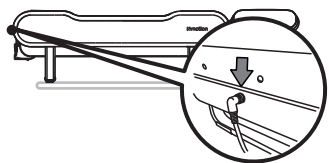

Свържете конектора на контролера.

4 Включете захранването

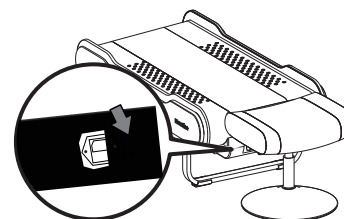


Превключвател на захранването

След като свържете захранващия кабел към основното устройство, както е показано на фигурата, включете превключвателя на захранването.


Внимание
Изключете превключвателя на захранването, когато захранването не е свързано. В противен случай това може да доведе до повреда.

5 Включване на пулт

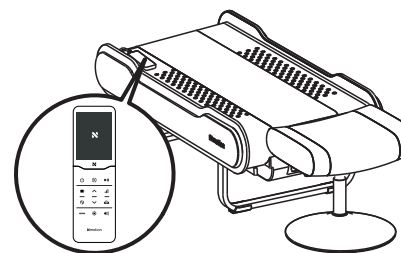

Натиснете бутона, за да включите захранването и да използвате устройството.
(Вижте „Как да използвате пулта“ за повече подробности)

Тестови операции след инсталиране

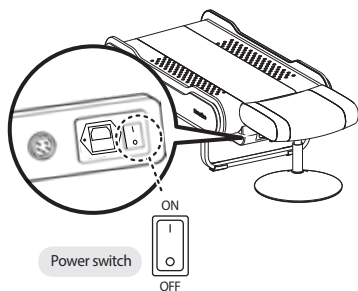


1 Проверете захранването на продукта

Включете захранването.



Внимание


Уверете се, че захранването е изключено след употреба или когато не се използва. В противен случай това може да доведе до повреда.

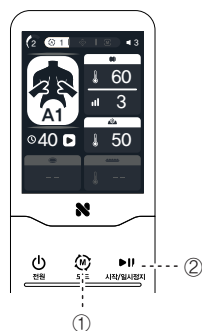

2 Проверка на работата на Смарт модула


Работи чрез задаване на желания режим.

- ① Избор на режим ()
- ② Бутон Старт/Пауза ()

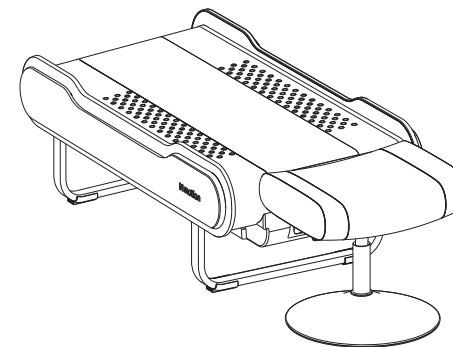

Как да използвате продукта


- 20 Бутони на пулта
- 21 Състав на екрана
- 22 Как да използвате пулт
- 22 Режими (автоматичен, интензивен, ръчен)
- 25 Смарт модул Настройка на температура/интензивност
- 26 Предварително загряване/Скорост
- 27 Настройка на звука на пулта
- 28 N-sonic (опционално)
- 29 Мулти елемент(опционално)
- 30 Модул за въздушен масаж
- 31 Използване на продукта
- 32 Как да предприемете спешни случаи
- Действия по време на употреба

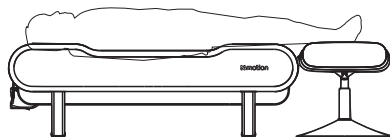


3 Използвайте продукта

След като легнете на спомагателния стол (табуретка) с краката си нагоре, изберете режим на пулта и натиснете бутона за стартиране на екрана на пулта, за да управлявате продукта.

Бутони на пулта

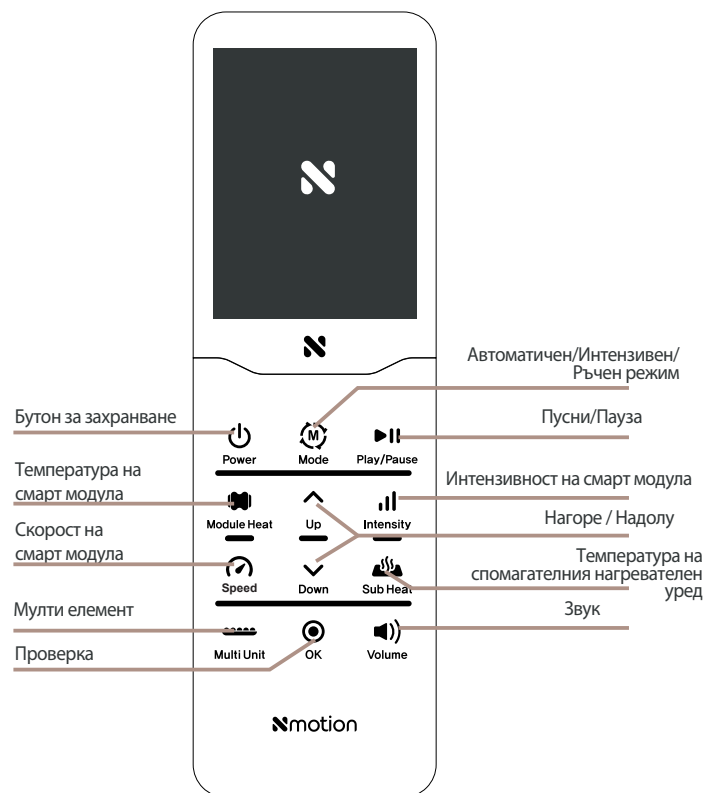


Дисплей

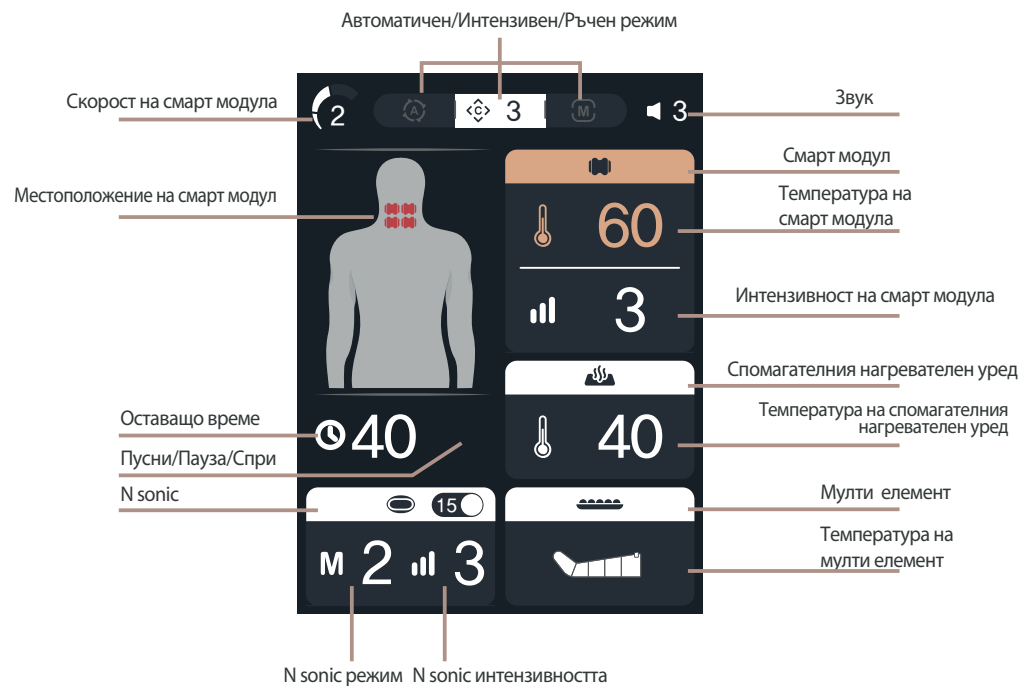

Как да използвате пулта

Автоматичен режим

- ① Натиснете бутона за режим (M) и когато Автоматичен режим (A) е избран в горната част на екрана, натиснете бутона нагоре/надолу, (^ v) за да изберете желания номер на режим и натиснете бутона ОК (●).

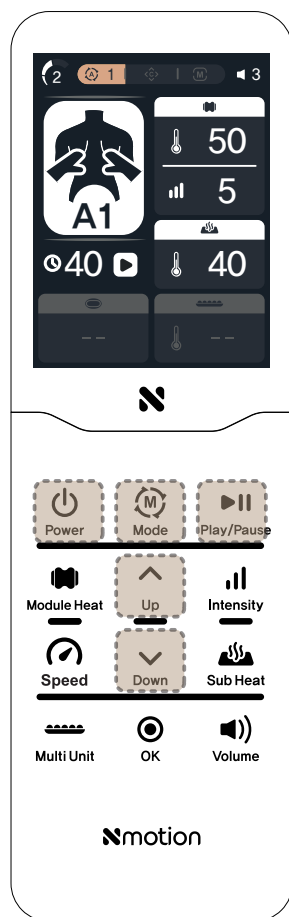

Автоматичен режим (Описания на видовете масаж)

Автоматичен режим 1 (Стандартен режим)	Около 43 минути
Автоматичен режим 2 (Режим на релаксация)	Около 32 минути
Автоматичен режим 3 (Режим на разтягане)	Около 30 минути
Автоматичен режим 4 (Специален режим)	Около 60 минути
Автоматичен режим 5 (Режим на моксibuзия)	Около 34 минути
Автоматичен режим 6 (Режим на екстензия)	Около 20 минути
Автоматичен режим 7 (Режим голф)	Около 20 минути
Автоматичен режим 8 (Режим на имунитета)	Около 30 минути
Автоматичен режим 9 (Режим на заспиване)	Около 40 минути
Автоматичен режим 10 (Режим на медитация)	Около 30 минути

- ② Натиснете бутона за възпроизвеждане (▶||) за да започнете масажа.

Как да използвате пулта

Интензивен режим

- ① Натиснете бутона за режим (M) и когато Интензивен режим (C) е избран в горната част на екрана, натиснете бутона нагоре/надолу, (^ v) за да изберете желания номер на режим и натиснете бутона ОК (●).




Интензивен режим (Описания на видове масаж)

Интензивен режим 1 (Бърз режим)	Около 20 минути
Интензивен режим 2 (Интензивно върху врата)	Около 25 минути
Интензивен режим 3 (Интензивно върху раменете)	Около 15 минути
Интензивен режим 4 (Интензивно върху врата и раменете)	Около 25 минути
Интензивен режим 5 (Специално за врат и рамене)	Около 25 минути
Интензивен режим 6 (Интензивно на гърба)	Около 25 минути
Интензивен режим 7 (Интензивно върху долната част на гърба)	Около 25 минути
Интензивен режим 8 (Интензивно върху бедрата)	Около 25 минути
Интензивен режим 9 (Интензивно върху долната част на гърба и бедрата)	Около 25 минути
Интензивен режим 10 (Режим на студент)	Около 25 минути

- ② Натиснете бутона за възпроизвеждане (▶||) за да започнете масажа.

Как да използвате пулта

Ръчен режим

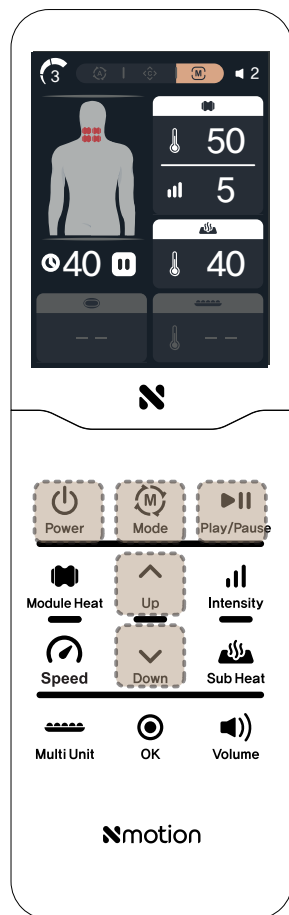

① Натиснете издръжте бутон (▲) или (▼). Отпуснете бутон на необходимо място.

② Натиснете бутон за възпроизвеждане (▶||) за да започнете масажа.


1 Известие

Желаната температура се достига (Топло или Хладно) при температура в рамките на зададения температурен диапазон (минимум до максимум) за всяка част в рамките на един час.

Как да използвате пулта

Смарт модул за настройка на температура/
интензивността


Настройка на температурата на смарт модула

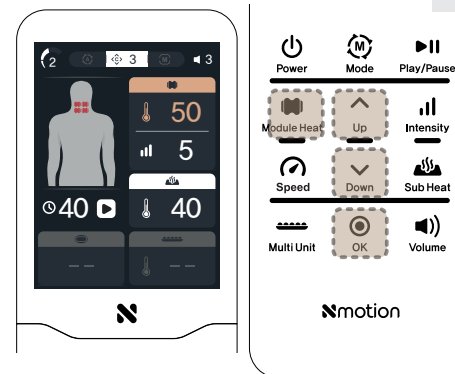

- ① Натиснете бутон за температура на смарт модула на пулта (🔥).
- ② Когато бутонът за температура на смарт модула е избран на екрана, натиснете бутон нагоре/надолу (▲▼), за да зададете желаната температура.
- ③ Натиснете бутон OK (⊙).

· Диапазон на настройка на температурата за смарт модула: 40-60 °C

Настройка на интензивността на смарт модула

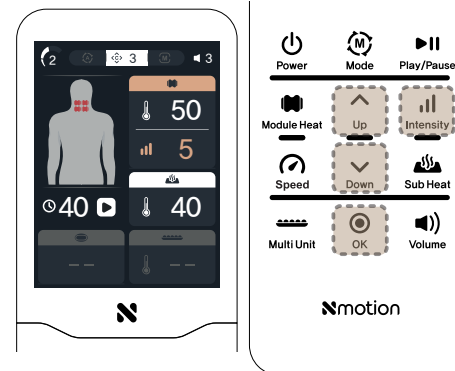


- ① Натиснете бутон за интензивност на (||) смарт модула на пулта.
- ② Когато на екрана е избран бутонът за интензивност на смарт модула, натиснете бутон нагоре/надолу (▲▼), за да зададете желаната интензивност.
- ③ Натиснете бутон OK (⊙).

· Диапазон на настройка на интензивността за смарт модула: стъпка 1-9

Как да използвате пулта

Предварително загряване/Скоростта

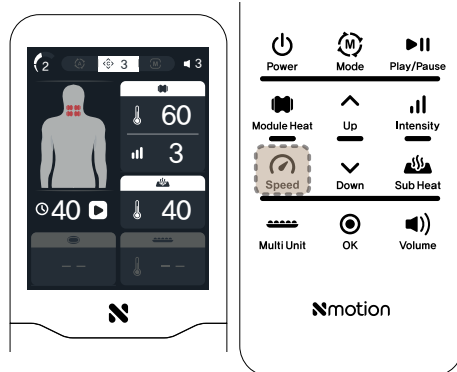


Скорост

- ① Натиснете бутона за скорост (🌀) на контролера.
- ② Стъпка 3 → Стъпка 2 → Стъпка 1 → Стъпка 3 промени.

Забележете



Скоростта е на три степени и може да се променя само в режим на готовност преди работа.

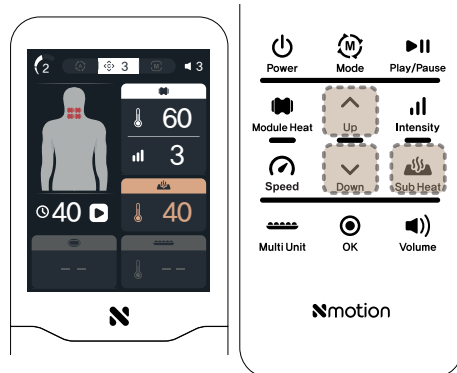


Допълнително затопляне настройка на частична температура

- ① Натиснете бутона за температура (🔥) на частта за допълнително затопляне на пулта.
- ② Когато на екрана е избран бутонът за температурата на допълнителната нагревателна част, натиснете бутона нагоре/надолу (⬆️⬆️), за да зададете желаната температура.

Как да използвате пулта

Настройка на звука на пулта

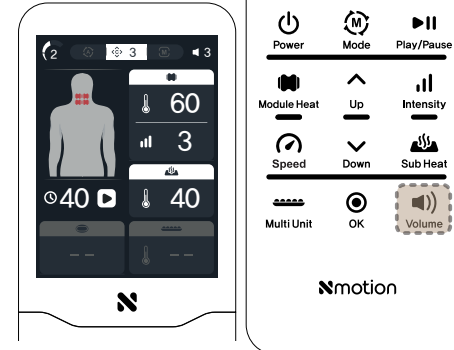

Настройка на звука на пулта


- ① Натиснете бутона за контрол на звука (🔊).
- ② Силата на звука може да се настрои от 0 до 9.

Забележете


🔊 В настройката Volume 9 увеличаването на силата на звука заглушава звука.

Как да използвате пулта

Nsonic (Опция)

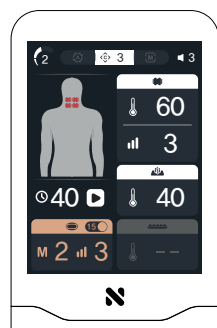


Страна за работа с бутони

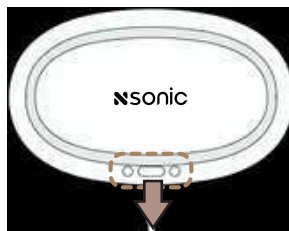

Състав на бутони

Страна на работа на модула

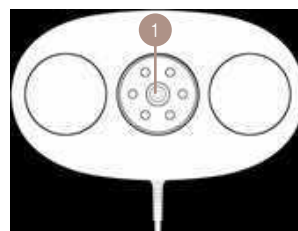

Състав на модула

Забележете

Работете с бутоните на продукта.

Интензивност: 4 стъпки
Време: 15/30 минути



Мощност Интензивност Време Режим

1 Модул за звукови вибрации





За да използвате Nsonic, поставете масажния модул на мястото, което искате да стимулирате. (* Можете също да го използвате с калфа Nsonic.)

※ Този елемент е по избор.

Как да използвате пулта

Мулти елемент (Опция)

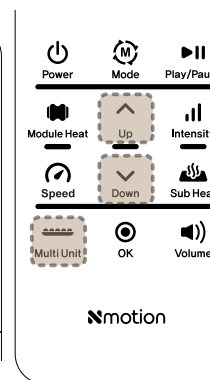
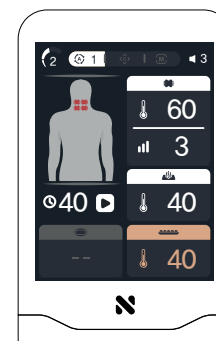


Настройка на температурата

- 1 Натиснете бутона на Мулти елемент (Multi Unit).
- 2 Когато бутонът за Мулти елемент е избран на екрана, натиснете бутона нагоре/надолу (Up/Down), за да зададете желаната температура.

Забележете

Преди употреба, уверете се, че Мулти елемент е свързан с основното устройство.

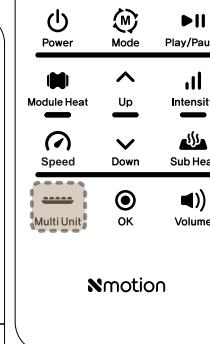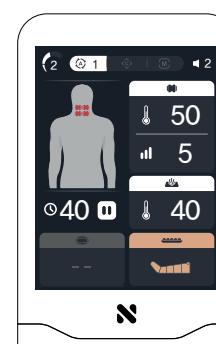

Модул за въздушен масаж


Когато се използва въздушен масажен модул, той се показва като въздушен масажен модул.

Забележете

Работете с бутоните на продукта.

Как да използвате пулта

Модул за въздушен масаж

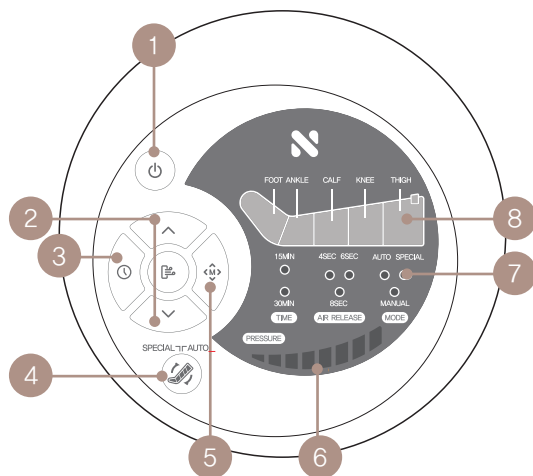

- 1 Бутон за захранване
- 2 Бутони за настройка на налягането (8 стъпки)
- 3 Бутон за време на работа (15/30 минути)
- 4 Бутон за автоматичен режим
- 5 Бутон за ръчен режим
- 6 Прозорец за показване на налягането
- 7 Прозорец за показване на състоянието на работа ((време на работа/време на изпускане на въздух/режим)
- 8 Прозорец за показване на работата на маншета

Процедура

- 1 Свържете захранващия кабел на модула за въздушен масаж към мелтунит конектор, след това подредете каналите на конектора на маншета и го натиснете докрай, като държите основния блок.

ВНИМАНИЕ Проверете дали типът маншет, който ще се използва, свети на дисплея на маншета. Ако не е свързан правилно, съществува риск от изтичане на въздух и това може потенциално да доведе до нараняване поради неизправност.

- 2 Закопчайте маншетите на крака според типа тяло на потребителя.

ВНИМАНИЕ Уверете се, че носите леки дрехи, вместо да поставяте маншетите върху гола кожа, за да се чувствате комфортно и да предотвратите проникването на пот в маншета. Закопчайте маншета докрай и прикрепете лентите с кука правилно. Въздушната камера на маншета може да бъде повредена, което може да представлява риск от нараняване.

- 3 Натиснете бутона за захранване и изберете 15 или 30 минути, като натиснете бутона за време на работа.

- 4 Изберете автоматичен или ръчен режим.

Автоматичен режим: Въздухът ще се въпръсква непрекъснато, за да масажира всяка част на тялото многократно и да подобри кръвообращението. Ръчен режим: Изберете това, когато искате интензивен масаж само на конкретна целева зона.

- 5 За да настроите налягането, натиснете бутона за настройка на налягането.


Има осем нива на налягане, които могат да се видят на дисплея.

ВНИМАНИЕ Ако приложите силен натиск от самото начало, това може да предизвика напрежение върху тялото ви. Уверете се, че сте задали нивото на натиск на ниво 1 в началото и постепенно увеличавате натиска, за да отговаря на вашето тяло.

- 6 След употреба, изключете маншетите от основното устройство.


ВНИМАНИЕ Премахнете въздуха от въздушната камера преди да използвате ципа и движете ципа внимателно, за да не се закъсвят чорапите, панталоните, телесните косми и т.н. в него. За да спрете устройството по време на употреба, първо изключете бутона за захранване.

Използване на продукта

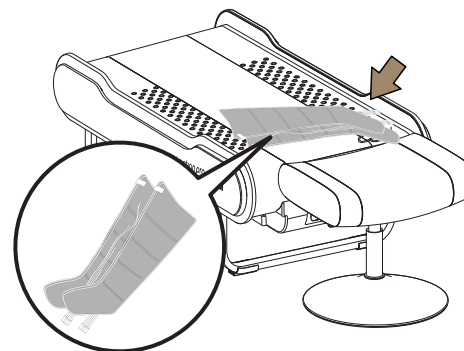

Внимание
Внимавайте да не огнете въздушния маркуч. (Това е поради риск от неизправност на устройството.)


Включване на основното устройство

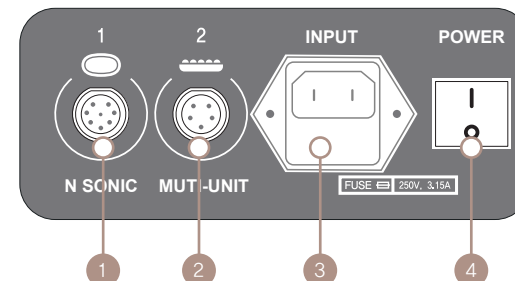

Включете захранващия бутон на основното устройство, след като се уверите, че желаните многофункционални и входни захранващи кабели са включени.

- 1 N sonic Тук е мястото, където се включва N sonic. (Не включвайте друго устройство, тъй като това може да причини повреда на продукта.)
- 2 Мулти елемент Тук се включва мулти-елемент като 9-сферен нагревателен проектор, нагревателна подложка за корем, модул за въздушен масаж и др.
- 3 Входен захранващ кабел Тук се включва захранващият кабел.
- 4 Превключвател на захранването Тук можете да включите/изключите захранването на основния блок.

Как да предприемете спешни действия по време на употреба

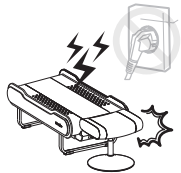

Прекратете използването на продукта незабавно и извадете щепсела от контакта, ако има мълния.




Прекратете използването на продукта незабавно и се свържете с вашия доставчик или с нашата компания, ако усетите мирис на изгаряне или забележите дим от продукта.




Прекратете употребата на продукта незабавно и се консултирайте с лекар, ако се появи някаква аномалия в човешкото тяло.



Изключете захранващия ключ незабавно, спрете да използвате продукта и се свържете с нашата компания, ако установите някаква повреда или прекъсване на захранването от продукта.

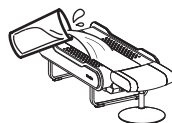

Изключете захранващия ключ, незабавно извадете захранващия щепсел и след това се свържете с нашата компания, ако сте налили вода в продукта.

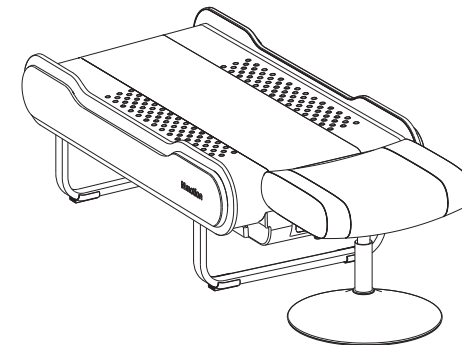

Съхранение и грижа за продукта

- 34 Как да съхранявате и почиствате продукта след употреба
- 35 Проверете индикаторния дисплей на пулта
- 37 Самопроверка
- 38 Преди запитване за сервиз
- 39 Спецификации на продукта
- 40 Гаранция на продукта

Как да съхранявате и почиствате продукта след употреба

Как да съхранявате устройството след употреба

1. Изключете устройството след употреба и изключете захранващия кабел от източника на захранване.
2. Как да съхранявате устройството
 - 1 Съхранявайте на място, далеч от вода.
 - 2 Съхранявайте на място, където няма риск от неблагоприятни ефекти от атмосферното налягане, температурата, влажността, вентилацията, слънчевата светлина или въздуха, съдържащ прах, сол и др.
 - 3 Обърнете внимание на условията за безопасност, като наклон, вибрации и удари (дори по време на транспортиране)..
 - 4 Не съхранявайте на място, където се съхраняват химикали или където се генерира газ.
 - 5 Съхранявайте на място, далеч от пряка слънчева светлина.
 - 6 В случай на продължително неизползване, отделете N sonic, външния нагревател и модула за въздушен масаж от конектора и ги съхранявайте отделно..

Екологични условия


- Класификация според степента на защита срещу проникване на вода: IP22, обикновено оборудване.
- По време на работа: Температура (5~40°C), влажност (15~90%), атмосферно налягане (700~1060 hPa), надморска височина (под 2000 м).
- Условия за транспорт и съхранение: Температура (-25~70°C), влажност (15~90%), атмосферно налягане (700~1060 hPa).

Как да почистите

Внимание

Уверете се, че сте изключили захранващия щепсел преди почистване. В противен случай може да предизвика електрически удари.

1. Отделете външната тъкан и я изперете.
2. Внимателно избършете корпуса на продукта, N sonic, мулти-устройството и контролера със суха кърпа, леко навлажнена с вода.
3. Внимателно избършете кожените части със суха кърпа, леко навлажнена с вода.
4. Не перете въздушните масажни ръкави. Вместо това ги избършете внимателно със суха кърпа, леко навлажнена с вода.

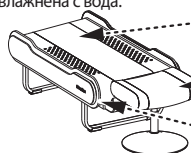

Външно покритие

Отделете и измийте външното покритие.

Кожени части

Нанесете малко вода върху суха кърпа и внимателно избършете.

Тяло на устройството

Нанесете малко вода върху суха кърпа и внимателно избършете.

Предупреждения при изхвърляне на продукта




Тази маркировка, показана на продукта или в неговото ръководство, указва, че не трябва да се изхвърля заедно с другите домакински отпадъци в края на работния му живот. За да се предотврати възможна вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Домакинствата трябва да се свържат с търговеца, от когото са закупили този продукт, или с местната си правителствена служба, за подробности относно къде и как могат да предадат този предмет за екологично безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Проверка на дисплей на пулта



Внимание

Не разглобявайте продукта произволно, ако възникне грешка, а извадете захранващия щепсел, изключете захранващия ключ и след това се свържете с вашия доставчик. Ако разглобите продукта произволно, това може да причини сериозни наранявания и/или повреда на продукта.

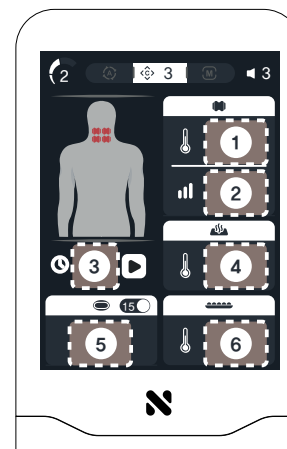

1 ES11, ES12, ES13, ES14, ES15

2 EL11, EM10, EM16, EM17, EM18, EM19, EM20, EM26, EM27, EM28, EM29, EM36, EM38, EM39, ER11, ER21

3 EC1, EC2, EC3, EC4

4 EH11, EH12, EH13, EH14, EH15, EH21, EH22, EH23, EH24, EH25

5 EN11

6 EE11, EE12, EE13, EE14, EE15

Дисплей

Код на грешка

Грешка в комуникацията	EC1	Грешка в комуникацията между контролера и основната платка.	EC2	Грешка в комуникацията между основната платка и модулната платка.
	EC3	Грешка в комуникацията между основната платка и допълнителната платка (N sonic)		

Самопроверка

Смарт модул	Двигател	EM16	Тахометърът на трансферния мотор не е сменен.	EM26	Тахото на мотора за нагоре/надолу не е променено.	
		EM36	Тахометърът на двигателя за движение не е променен.	EM17	Превключателят за ограничение на мотора за прехвърляне е натиснат по време на работа.	
		EM27	Превключателят за ограничение на мотора нагоре/надолу е натиснат по време на работа.	EM18	Претоварване в трансферния мотор	
		EM28	Претоварване в мотора за нагоре/надолу	EM38	Претоварване в двигателя на движението	
		EM19	Лимитът на трансферния мотор не е натиснат.	EM29	Лимитът на мотора за нагоре/надолу не е натиснат.	
		EM39	Сензорът за отвор на мотор за движение не е разпознат.	EM10	Прехвърляне на моторни лимити (H, L) натиснати едновременно.	
		EM20	Едновременно натиснати горна/долна граница на мотора (U, D)			
	Вътрешен нагревателен елемент	ES11	Прекъсване в вътрешния нагревателен елемент – дясна страна	ES12	Прекъсване в температурния сензор на вътрешния нагревателен елемент – дясна страна	
		ES13	Прегряване на вътрешния нагревателен елемент – дясна страна	ES14	Късо съединение във вътрешния нагревателен елемент.	
		ES15	Късо съединение в температурния сензор на вътрешния нагревателен елемент			
	Сензор за дупки	ER11	Сензорът за отвор не е разпознат.	ER21	Сензорът за отвор не е разпознат.	
	Тензодатчик	EL11	Извеждане на необичайна стойност			
	Свързано с основното устройство	Допълнителен нагревателен елемент	EH11	Прекъсване в нагревателния елемент на ръката – дясна страна	EH12	Прекъсване в температурния сензор на нагревателния елемент на ръката – дясна страна
			EH13	Прегряване на нагревателния елемент на рамото – дясна страна	EH14	Късо съединение в нагревателния елемент на ръката – дясна страна
			EH15	Късо съединение в температурния сензор на нагревателния елемент на ръката – дясна страна	EH21	Прекъсване в нагревателния елемент на ръката – лява страна
EH22			Прекъсване в температурния сензор на нагревателния елемент на ръката - лява страна	EH23	Прегряване на нагревателния елемент на рамото – лява страна	
EH24			Късо съединение в нагревателния елемент на ръката – лява страна	EH25	Късо съединение в температурния сензор на нагревателния елемент на ръката – лява страна	
Вътрешен нагревателен елемент		EE11	Прекъсване във външния нагревателен елемент	EE12	Прекъсване в температурния сензор на външния нагревателен елемент	
		EE13	Прегряване на външния нагревателен елемент	EE14	Късо съединение във външния нагревателен елемент.	
		EE15	Късо съединение в температурния сензор на външния нагревателен елемент			
Акcesoари		Звукова вибрация	EN11	Усилвател, свързан със звуковите вибрации на N sonic.		

Внимание

Може да има риск от наранявания или пожар, ако не проверите следното. Уверете се, че проверявате следното.

Проверете преди употреба

1. Свързан ли е захранващият кабел към контакт? ДА ☒ НЕ ☐
2. Пулта работи ли добре? ДА ☒ НЕ ☐
3. Показва ли се индикацията за температура на прозореца на температурния индикатор на контролера? ДА ☒ НЕ ☐
4. Температурата на проектора не е ли твърде висока? ДА ☐ НЕ ☒
5. Температурата на спомагателния нагревателен блок не е ли твърде висока? ДА ☐ НЕ ☒
6. Проверихте ли за повреди на захранващия кабел или състоянието на кабела? ДА ☒ НЕ ☐

Проверете след употреба.

1. Изключено ли е захранването на пулта? ДА ☒ НЕ ☐
2. Изключено ли е многоблоковото устройство? ДА ☒ НЕ ☐
3. Изключен ли е захранващият превключател до край? ДА ☒ НЕ ☐
4. Захранващият кабел отделен ли е от контакта? ДА ☒ НЕ ☐

Преди запитване за сервиз



Внимание

Уверете се, че сте проверили следното, преди да се обърнете към сервизен център, ако възникне някакъв проблем в продукта. Дори без повреда, уредът може да функционира неправилно, ако се използва неправилно.

Списък за проверка при необичайна работа на пулта

Лампите на пулта не работят.	1 Включете главния захранващ бутон. 2 Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно. 3 Проверете дали предпазителят в главния захранващ бутон не е изгорял. 4 Проверете кода за грешка на пулта
На смарт модула се появява предупредително съобщение.	Това е съобщение за безопасност, предизвикано от повреда на нагревателния елемент на смарт модула. Нагревателният елемент трябва да бъде заменен, за да се възобнови работата. Не се опитвайте да разглобявате продукта сами. Вместо това се свържете с най-близкия търговец или сервизен център.
На многофункционалното устройство (абдоминална нагревателна подложка) се появява предупредително съобщение.	Това е съобщение за безопасност, предизвикано от повреда на нагревателния елемент на многофункционалния уред. Нагревателният елемент трябва да бъде заменен, за да се възобнови работата. Не се опитвайте да разглобявате продукта сами. Вместо това се свържете с най-близкия търговец или сервизен център.
На спомагателния нагревателен уред се появява предупредително съобщение.	Това е съобщение за безопасност поради повреда на спомагателния нагревателен уред. Нагревателният елемент трябва да бъде заменен, за да се възобнови работата. Не се опитвайте да разглобявате продукта сами. Вместо това се свържете с най-близкия търговец или сервизен център.

Списък за проверка при необичайна работа на смарт модула

Смарт модулет не работи.	1 Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно. 2 Проверете дали на екрана на контролера се показва код за грешка. Не се опитвайте да разглобявате продукта сами. Вместо това се свържете с най-близкия търговец или сервизен център.
В случай на шум, докато смарт модулет функционира.	Възможно е да се появи шум, докато смарт модулет работи. По-специално, шумове могат да бъдат причинени от триенето на плата по време на зиг-заг движения или операции по подравняване. Това са работни шумове, които се появяват, докато продуктът функционира нормално и не се повреди.

Спецификации на продукта

Име на продукта	Н-Моушън
Име на класификация и име на модел	Топлинен масажор N7-SH
Производител	NUGA MEDICAL CO., LTD. 185, Jiraeul-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si, Gangwon-do, Korea
Дата на производство / номер на производство	Отбелязано върху продукта.
Тегло на продукта	54.2 kg
Размер на продукта	1,760 X 710 X 442 (mm)
Електрически рейтинг	100-240 Vac, 50/60 Hz
Консумация на енергия	180 W



ГАРАНЦИОННА КАРТА

Продавач		Купувач	
Адрес		Адрес	
GSM		Име, Фамилия	
Подпис		GSM	
Печат		Подпис	

Название на изделието	
Сериен номер	
Гаранционен период	
Дата на закупуване	

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Настоящата гаранционна карта описва търговската гаранция, предоставена от

....., със седалище и адрес на управление в качеството си на оторизиран търговец на продукт на територия на Република България; Гаранционната карта е валидна само с прикачен към нея документ за покупка (фискален бон/фактура).

2. Гаранционният срок на продукта е 24 месеца от датата на покупка и съгласно чл. 37ал.1 от ЗПЦСЦУПС, В рамките на гаранционния срок безплатно се отстраняват проблеми на устройството, възникнали в следствие на скрит фабричен дефект или грешки при производство.

3. При проява на дефект устройството се приема а търговския обект на Търговеца за диагностика и гаранционно обслужване. При приемането се издава документ за постъпване, който следва да бъде представен от клиента при получаване на устройството. Ремонтът или замяната се извършват в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на Продавача. Срокът за извършване на ремонт или замяна на стоки, които не съдържат цифрови елементи е един месец, считано от датата на уведомяване на продавача,

4. Отстраняването на проблеми се извършва чрез ремонт или замяна. Потребителят може да избира между ремонт или замяна на стоката, Освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи на продавача и при спазване на чл.33 от ЗПЦСЦУПС. Гаранционният срок спира да тече за времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна.

5. Потребителят не може да претендира разваляне на договора или пропорционално намаляване цената на продукта, когато търговецът е поправил продукта в рамките на законовия срок или го е заменил с нов-съгласно с чл.34, ал. 1 и 2 от ЗПЦСЦУПС. Клиентът не може да претендира разваляне на договора, ако несъответствието на продукта е незначително.

6. Търговецът няма задължения по закон по настоящата гаранция да осигури оборотен уред за времето през което се обработва предявената рекламация.

7. В случай на замяна на продукта, той може да бъде заменен със същия модел или с друг еквивалентен модел, който има същите функционални и технически характеристики като оригиналния продукт.

8. Ремонтирани или заменени продукти могат да съдържат нови и/или обновени компоненти.

9. Отстраняване на несъответствията по настоящата гаранция трябва да бъде извършено от Търговеца или от оторизиран от него сервизен център. Гаранцията на продукта ще бъде невалидна в случай че извършен ремонт от неоторизиран сервизен център или от друго неоторизирано лице. Заменени дефектни части остават собственост на Търговеца.

10. Гаранционният срок не е срок за връщане на закупен продукт. Срокът за връщане е регламентиран в ЗЗП и позволява разваляне на сделки от разстояние в 14 дневен срок, ако продуктът е със запазена опаковка и не е ползван. При покупка в търговски обект няма основание за връщане на покупката, ако продуктът работи изправно, както рекламирано, без значение дали е разопакован или не. Ако продуктът не работи коректно, следва да бъде приет за гаранционно обслужване. Гаранцията не покрива, нормално износване (амортизация) на продукта и някои от следните проблеми и повреди, възникнали в следствие на не спазени инструкции по експлоатация и неправилна употреба; злополука, механични повреди, причинени от удар, сътресение, изпускане, намокряне, пожар, природни бедствия, токови удари, работа с нестандартна захранваща мрежа или други външни въздействия извън контрола на Търговеца: упражнена прекомерна сила при употреба, невнимание и небрежност; използване на агресивни почистващи препарати; употреба на аксесоари и консумативи, различни от създадените от производителя за съответното устройство, опити за ремонт или модификация на устройството от страна на потребителя или трети лица сервизи, счупено или надраскано стъкло, повреден корпус, потребителят не е спазил степента на водоустойчивост, намаляване ефективността на работа с течение на времето на консумативи като батерии; презареждане на батерията или неправилна употреба, несъответствена на описаното в инструкциите за експлоатация, използване на зарядни устройства , не спазени условия, описани в инструкциите за експлоатация за транспорт, монтаж, инсталация, експлоатация и съхранение, 11. Търговец не носи отговорност за пропуснали ползи или причинени вреди. Отговорността на търговеца се простира до правилната работа на продукта в гаранционния срок.

Инструкции за експлоатация и безопасно ползване може да намерите в ръководството за потребителя:

Тази търговска гаранция не отменя правата на потребителя, произлизащи от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС), цитирани по-долу:

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената;

3. да развали договора.

(2) В случаите по ал.1 т.1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2. значимостта на несъответствието

3. възможност да бъде предоставено друго средство за защита на потребителя без значително неудобство на продавача.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал.2, т.1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи :

1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл.34, ал.1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл.34, ал.3 и ал.4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал.3;

2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи,

- продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл.31;
3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.
5.) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.
6.) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл.34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месен, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, която са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел. преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл.35 Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността па получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие. Чл.36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора да продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл.33., потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи на потребителя.

Чл.37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи в срок до две години, считано от доставянето на

- стоката;
2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или Цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл.31. ал.1 и 2. без да се възпрепятства прилагането на чл.28, ал.3. т.1;
3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба, предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрови услуги за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите .елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката от започването на непрекъснато предоставяне цифровото съдържание или цифровата услуга;
4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителя може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.
- (2) Срокът по ал.1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал.1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал.1

(4) ОПИСАНИЕ НА ГАРАНЦИОННИ РЕМОНТИ				
№	Дата на приемане	Описание на ремонта	Дата на предаване	Подпис и печат
1				
2				
3				
4				
5				